

GEC Zugtaster Patientenzimmer

Bedienungsanleitung und Anwendung



Beschreibung

Die Rufauslöser sind Zimmermodule der GEC-Produktserie. Sie sind mit dem Zimmerbus verbunden und gestatten es, über den Zimmer Manager Rufe auszulösen. Die Zimmermodule können Tasten und/oder Buchsen sowie eine Zugschnur enthalten.

Zu jeder Taste oder Buchse gehört eine LED-Indikatorlampe (4). Nach neuer Norm darf nur noch das Gerät leuchten, welches ausgelöst hat. Das heisst die Quittiereinheit leuchtet nicht mehr.

Der Betrieb der Zimmermodule wird fortlaufend über den verbundenen Zimmermanager überwacht. Dies ermöglicht es, Störungsmeldungen bei einem Ausfall direkt an die Technische Leitstelle zu melden

Funktion Normalruf

Ziehen Sie einmal an der Schnur des Zugtasters (1), um einen Ruf auszulösen. Das LED-Lämpchen (4) leuchtet rot und dient als Beruhigungslampe, dass der Ruf erfolgreich abgesetzt wurde.

Funktion Stürmen mit Anwesenheit

Wenn die Anwesenheit eingeschaltet ist und ein Zimmermodul ausgelöst wird, so wird automatisch ein Notruf abgesetzt.

Funktion Zugschnur im Pat. Zimmer (1)

Ziehen Sie einmal an der Schnur des Zugtasters (1), wird ein Normalruf mit Standort Lavabo (Bsp. 878.L) abgesetzt.

Funktion Zugschnur im WC

Ziehen Sie einmal an der Schnur des Zugtasters (1), wird ein WC-Ruf (Bsp. 878.W) abgesetzt.