


Trettmatte CareMat

Bedienungsanleitung

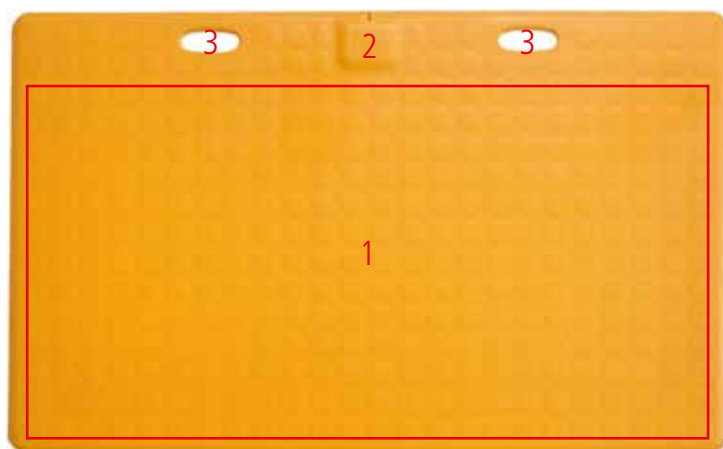

1. Aktive Zone (Rufauslösung)
2. Gehäuse mit Netzteil und Batterie
3. Tragegriffe

Reinigung


Die Trettmatte können Sie mit handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln mit max. 70 Vol% Alkohol reinigen. Keine ätzenden Mittel verwenden.

Transport und Lagerung

Beim Transport und der Lagerung darf die Trettmatte nicht stark durchgebogen werden. Stellen Sie ausserdem keine schweren Lasten darauf oder stapeln Sie nicht mehr als 10 Trettmatten aufeinander.

Einschalten

1. Nehmen Sie die Elektronik aus dem Gehäuse (siehe Schritt 1 & 2 Batteriewechsel).
2. **Einmal** Druckknopf drücken > das LED Lämpchen leuchtet weiss auf.
3. Innerhalb von 10 Sekunden **zweimal** Druckknopf drücken > das LED Lämpchen leuchtet zweimal blau auf.
4. Das LED Lämpchen blinkt violett.

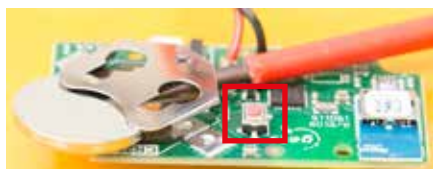

Konnten Sie die Trettmatte nicht erfolgreich einschalten, dann müssen Sie mindestens 10 Sekunden warten, bis Sie den nächsten Versuch starten.

Ausschalten

Um die Trettmatte auszuschalten, nehmen Sie die Batterie einfach heraus.

Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Batterie mit der mindeststromstärke von 20mA verwenden. Ansonsten schaltet die Trettmatte selbständig aus. Wir empfehlen eine Energizer oder Duracell C2032 Lithium 3 V Batterie.

Schritt 1

Lösen Sie die sechs Schrauben mit einem Kreuz-Schraubenzieher.



Schritt 2

Nehmen Sie den gelösten Deckel ab. Sie sehen die Elektronik mit der Batterie. Nehmen Sie diese heraus.



Schritt 3

Batterie vorsichtig mit einem Schraubenzieher rausdrücken. Setzen Sie anschliessend die neue Batterie mit dem Pluszeichen nach oben ein.



Schritt 4

Platzieren Sie die Elektronik und die Batterie zurück in die Einbuchtung. Abschliessend können Sie die Abdeckung wieder anschrauben.

