

GETS Ruf-/Abstelleinheit

Bedienungsanleitung



1. Ruftaster
2. Anwesenheitskontrolle
3. Anwesenheitstaster
4. Display
5. Anwesenheit LED
6. Ruf in Sektion / Abteilung
7. Ruf LED

Rufauslösung Normalruf

Drücken Sie einmal den roten Ruftaster, um einen Ruf auszulösen. Das LED Lämpchen Ruf leuchtet rot und dient als Beruhigungslampe, dass der Ruf erfolgreich abgesetzt wurde.

Anwesenheit

Drücken Sie einmal den grünen Anwesenheitstaster für die Anwesenheit zu aktivieren und den Normalruf zu quittieren. Das Display wird eingeschaltet und das LED Lämpchen Anwesenheit leuchtet grün.

Rufauslösung Notruf

Wird ein Ruf mit der roten Ruftaste ausgelöst, während die Anwesenheit eingeschaltet ist, wird automatisch ein Notruf ausgelöst.

Anwesenheitskontrolle

Wenn die Anwesenheit aktiv ist, kann das Pflegepersonal die Anwesenheitskontrolle einschalten. Drücken Sie dafür kurz die blaue Kontrolltaste und auf dem Display durchlaufen alle Zimmer, bei denen die Anwesenheit aktiviert ist. Nach 20 Sekunden verschwindet die Anwesenheitskontrolle automatisch wieder.

Anwesenheit abschalten

Bei erneuten Drücken der grünen Anwesenheitstaste wird die Anwesenheit zurückgestellt respektive abgeschaltet.

Ruftypen bei aktiver Anwesenheit



Kein Ruf ist anstehend.



WC-Ruf, der akustisch nicht aggressiv ist.



Anwesenheit (siehe Anwesenheitskontrolle)



Notruf, der rot/gelb blinkt und aggressiv ist.



Normalruf, der akustisch nicht aggressiv ist.



Weglauf Ruf, der rot/blau blinkt und aggressiv ist.