

ParCom Medaillon

Bedienungsanleitung



1. Druckknopf
2. LED-Anzeige
3. Magnetkontakt

Rufauslösung

Drücken Sie einmal den Druckknopf, um einen Ruf auszulösen. Die LED-Anzeige leuchtet kurz auf und gibt Rückmeldung, ob der Ruf abgesetzt wurde (grün) oder nicht (rot).

Quittierung

Drücken Sie für die Rufquittierung dreimal schnell den Druckknopf oder halten Sie das Magnet mindestens eine Sekunde an den Magnetkontakt. War die Quittierung erfolgreich, dann leuchtet die LED-Anzeige grün auf.

Einschalten

1. Einmal Druckknopf drücken > die LED-Anzeige leuchtet weiss auf.
2. Zweimal Druckknopf drücken > die LED-Anzeige leuchtet zweimal blau auf.
3. Die LED-Anzeige blinkt violett.

Bei nicht erfolgreichem Einschalten muss 10 Sekunden gewartet werden.

Ausschalten

1. Druckknopf 10 Sekunden gedrückt halten.
2. Die LED-Anzeige pulsiert rot.
3. Sobald die LED-Anzeige durchgehend rot leuchtet, halten Sie sofort einen Magnet auf den Magnetkontakt.
4. Die LED-Anzeige leuchtet violett auf.

Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Batterie mit der Mindeststromstärke von 20mA verwenden. Ansonsten schaltet das Medaillon selbständig aus. Benutzen Sie daher die Duracell C2032 Lithium 3 V Batterie.



Schritt 1

Lösen Sie die vier Schrauben mit einer Torx T5.



Schritt 2

Nehmen Sie den gelösten Deckel ab. Entnehmen Sie die Batterie vorsichtig.



Schritt 3

Setzen Sie die neue Batterie ein.



Schritt 4

Befestigen Sie den Deckel wieder mit den vier Schrauben und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring korrekt eingesetzt ist.

Masse (LxBxT)	50x38x13mm
Gewicht	23g
Reichweite drinnen/draussen	25-30 / 100m
Stromverbrauch (max.)	30mA
Spannung	3 V DC
Autonomie ²	18 Monate
Material	PC + ABS
IP Schutzindex	IP65
Sende- / Empfangsleistung	25mW und 12 dbm